

anima-home Montage / Inbetriebnahme



01.

Klemmzwinge für anima-home anbringen (z. B. Bettrahmen).



02.

anima-home auf den Magnethalter der Klemmzwinge aufsetzen.



04.

Sensor auf die gewünschte Position ausrichten.



06.

Kabel für Schwesternrufanlage seitlich in „SR“ einstecken (Verbindung zur Rufanlage!)



03.

Klemmhalter mit Sensor an geeigneter Stelle befestigen (z. B. Bettrahmen).



05.

Stecker für Sensor wahlweise seitlich in „Sensor 1“ oder in „Sensor 2“ einstecken.



07.

Netzstecker seitlich in Netz einstecken. anima-home durchläuft Selbsttest.

anima-home ist betriebsbereit!

anima home Funktionen und Optionen



01.

Alarmverzögerung wahlweise von 0,5 Sek bis 5 Sek einstellen.



03.

Alarm bestätigen: Taste „OK“ drücken.



05.

Optionale Variante: Alternative Anbringung mit Klemmleiste



02.

Alarm wird ausgelöst: LED leuchtet rot. Zusätzliche indirekte Hintergrundbeleuchtung (Orientierung).



04.

Alarm unterbrechen: Pausentaste drücken. Das Signal wird für 6 Minuten unterdrückt. Im Anschluss ist anima-home wieder automatisch betriebsbereit.



06.

Optionale Variante mit platzierter anima-home auf Klemmleiste

anima Vertriebsgesellschaft e.K.
Tel.: 0 25 72 . 95 10 40
E-Mail: anima@anima-med.com